

Oční kapky Max OptiFresh 10 ml

Příbalový leták a návod k použití Tento příbalový leták obsahuje důležité informace o bezpečném použití produktu. Prosím, čtěte pozorně.

Charakteristika:

Lubrikační a zvlhčující kapky udržují kontaktní čočky vlhké a zklidňují oči. Zvyšují komfort nošení kontaktních čoček. Jsou doporučeny pro denní nošení, častou výměnu a jednorázové měkké kontaktní čočky.

Složení:

sterilní izotonický roztok - hydroxypropylmethylcelulóza 3 mg/ml, chlorid sodný, kyselina boritá, chlorid draselný, perboritan sodný

Návod k použití:

V případě potřeby použijte 2-3 kapky a několikrát mrkněte. Po použití uzávěr pevně nasadte zpět.

Upozornění:

- Aby se zabránilo kontaminaci, nedotýkejte se koncem kapacího uzávěru oka ani jiných předmětů
- Lahvičku po použití ihned pevně uzavřete
- Skladujte při teplotách 5-30 °C
- Přípravek nepoužívejte po uplynutí 30 dní od prvního otevření
- Nepoužívejte přípravek s prošlou expirační lhůtou
- Nepoužívejte, pokud jste alergičtí na některou složku tohoto produktu
- Pokud potíže přetrvávají, okamžitě vyjměte čočky a kontaktujte svého očního lékaře
- Nepoužívejte současně s žádnými očními léky, s výjimkou doporučení očního lékaře
- Dodržujte postupy denní péče o kontaktní čočky dle doporučení vašeho očního lékaře
- Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
- Nepoužité kapky vylijte do odpadu a prázdnou lahev zlikvidujte s místními předpisy pro likvidaci odpadu

Dovozce: WIXI, s.r.o., Revoluční 1017, 290 01 Poděbrady, IČ: 28518772

Výrobce: STERICON PHARMA PVT, Bangalore-99, Karnataka, India